





# 1. アプリ起動・システムログイン

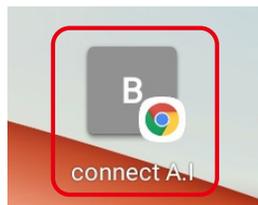

デスクトップ  
「connect A.I.」をタップ



「メールアドレス」の窓をタップ

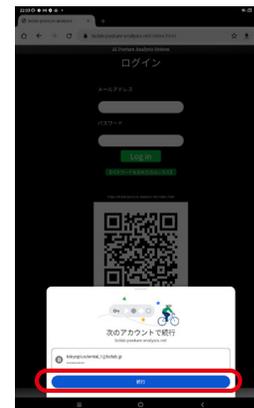

青色「続行」をタップ



「Log in」をタップ



上記の画面が表示されれば「Log in」  
完了です。

## 2. 患者様情報の登録手順 (初回の患者様を撮影する場合)




「撮影」をタップ



「新規登録」をタップ



患者様の情報を入力  
※必須項目は必ず入力してください

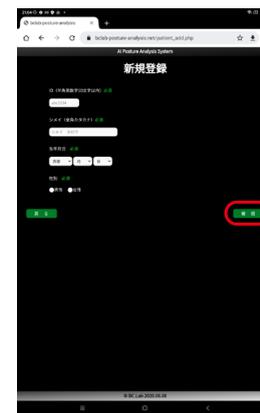

「確認」をタップ



登録情報を確認の上、  
問題なければ  
「登録」をタップしてください



「このまま、撮影開始する」  
をタップ




「撮影開始」をタップ



「身長入力」をタップ



身長入力が済んだら  
「ok」をタップ

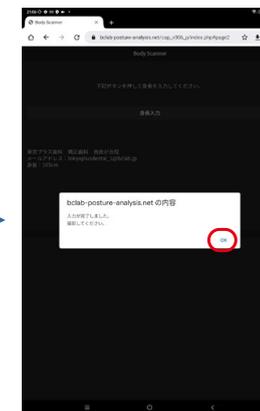

ダイアログが出たら確認の上  
「ok」で進んでください

「撮影」を行ってください  
本資料「4. 撮影の手順」を参照

### 3. 患者様情報の検索手順 (2回目以降の患者様を撮影する場合)



「撮影」をタップ



「シメイ」または「ID」検索を選択の上、  
「シメイ」または「ID」を入力して  
「検索」をタップください




目的の患者様が表示されたら  
「撮影」をタップ



「撮影」を行ってください  
本資料「4. 撮影の手順」を参照


## 4. 撮影の手順

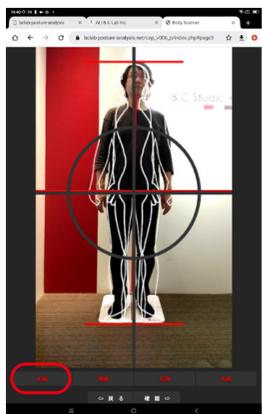

測定マットの上に、患者様に立っていただき、「正面」ボタンをタップする。撮影が終了したら、「OK」をタップして次に進む



測定マットの上に、患者様に立っていただき、「後面」ボタンをタップする。撮影が終了したら、「OK」をタップして次に進む

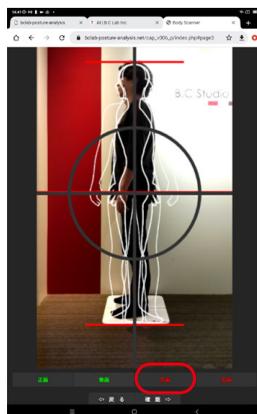


測定マットの上に、患者様に立っていただき、「左面」ボタンをタップする。撮影が終了したら、「OK」をタップして次に進む



測定マットの上に、患者様に立っていただき、「右面」ボタンをタップする。撮影が終了したら、「OK」をタップして次に進む




確認画面に遷移するので、撮影状態を確認して、問題なければ「分析依頼」を取り直したい場合は「戻る」で撮影画面に戻り、任意の方向の撮影を再度撮影行ってください

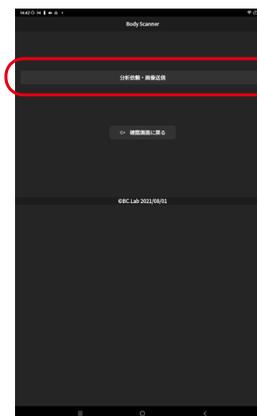

「分析依頼・画像送信」をタップする


A.Iが解析中しばらくお待ちいただき（15～30秒程度）「再表示ボタン」「ブラウザリロード」または、ID検索にIDを入力の上、検索ボタンをタップ  
右の画面に遷移したら分析完了です。「分析結果」ボタンをタップして結果をご覧ください。

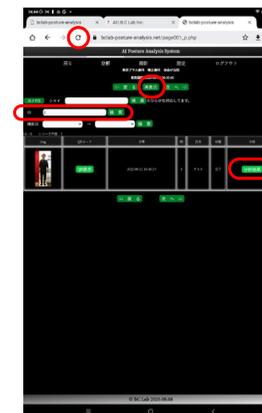


## 5. 帳票印刷の手順 (タブレットとプリンターは同一のネットワークに接続していただく必要があります。)



左上「印刷」をタップ

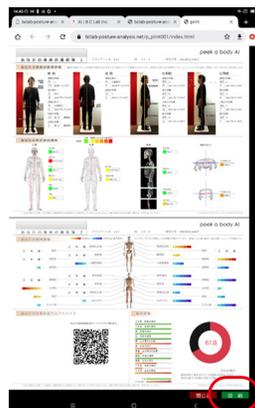

プレビューが表示されます  
右下「印刷」ボタンをタップ

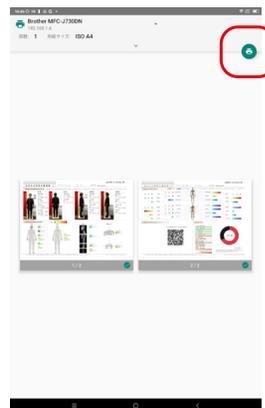

印刷プレビューが表示されます  
問題なければ、「プリンター」  
マークをタップして  
印刷してください